

## Szybkie testy z serii RAINBOW – instrukcja ogólna



Szybki test paskowy do wykrywania określonych patogenów z kawy.

### Instrukcja użytkowania:



1. Pobierz kawał bezpośrednio z odbytu. Jeśli próbki są płynne, pobierz pełną łyżkę.



2. Jeśli kawał jest stały, usuń nadmiar za pomocą szpatułki.



3. Dodaj zawartość łyżki do małej próbówki z płynem zwanej dalej próbówką testową.



4. Wstrząśnij próbówką testową, aby dobrze zhomogenizować.




5. Postukaj próbówką testową o twardą powierzchnię, aby cała ciecz zebrała się na dnie próbówki.

#### Dystrybucja:

WLD Epilab Wojciech Jędryczko  
ul. Wolności 8a, 07-407 Czerwin  
tel. +48 605 261 671, [www.epilab.pl](http://www.epilab.pl)

**EPILAB.PL**

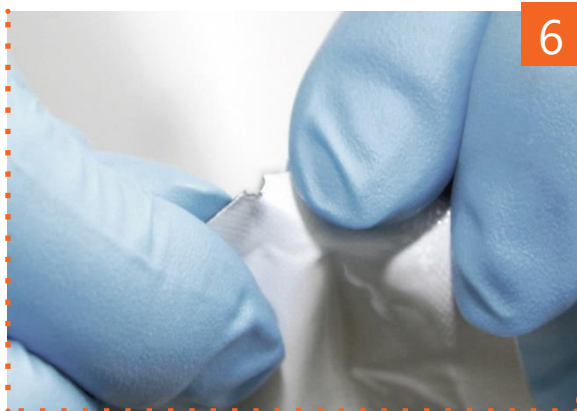

6

6. Rozerwij aluminiową kopertę na nacięciu. Po wyjęciu produktu z opakowania jego stabilność jest krótkotrwała, szczególnie w wilgotnym środowisku.



7

7. Włóż probówkę testową do probówki z paskami.



8

8. Przykręć górną część probówki z paskami. Musisz usłyszeć dwa oddzielne kliknięcia, aby przebić górną i dolną przegrodę probówki. Pozostaw urządzenie pionowo na płaskiej powierzchni i odczekaj 10 minut. Ciecz zawarta w probówce testowej przemieszcza się do probówki z paskami i powoli migruje wzdłuż pasków.



9

9. Czasami, zwłaszcza gdy próbka nie jest zhomogenizowana, migracja cieczy może zatrzymać się na jednym lub kilku paskach. W takim przypadku stuknij końcem probówki z paskami o twardą powierzchnię, aby umożliwić ponowne rozpoczęcie migracji.




10

10. Po 10 minutach odczytaj wyniki używając rysunku 11 (obok).

1 linia = wynik ujemny; 2 linie = wynik dodatni

11

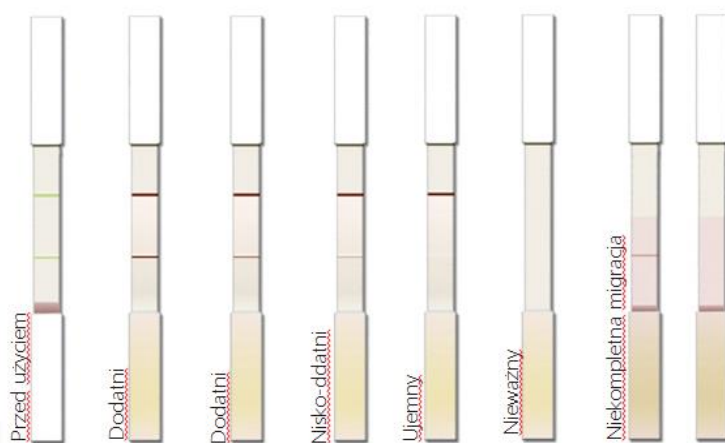

### Srodki ostrożności dotyczące stosowania

- Przechowuj zestawy w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Noś rękawiczki podczas przeprowadzania testu.
- Analizowana próbka nie powinna być zbyt zagęszczona. Nie przygotowywać objętości próbki większej niż załączona łyżka.
- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami biologicznymi.

### Dystrybucja:

WLD Epilab Wojciech Jędrzycki  
ul. Wolności 8a, 07-407 Czerwin  
tel. +48 605 261 671, [www.epilab.pl](http://www.epilab.pl)

**EPILAB.PL**